




1- Stockage des flacons à l'abri de la lumière entre 15°C et 30°C

2- Vérification de la date de péremption du flacon

3- Contrôle de la pastille




Ne pas utiliser

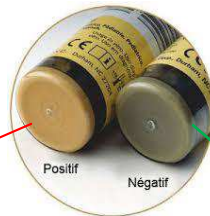

OK

4- Prélèvement de 10 ml de sang sur flacon aérobie **vert** puis anaérobie **orange** (utiliser le repère visuel)

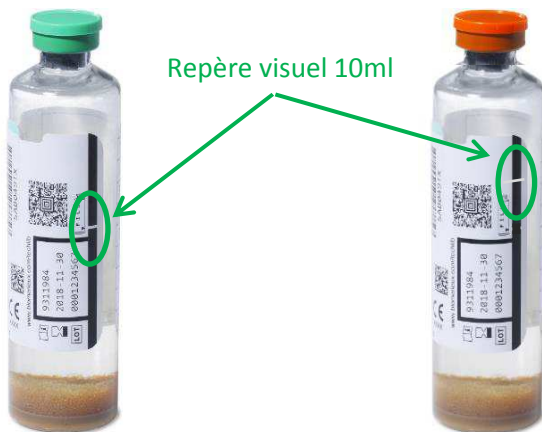

Diagnostic de septicémie : Prélever 40 à 60 ml de sang au total soit par :

- Ponction unique = 2 à 3 paires de flacons en une seule ponction
- Ponction Multiple : 2 à 3 paires/ 24h espacés de 30 à 60 min (préférable si suspicion d'endocardite)


Flacon insuffisamment rempli → Risque de faux négatif
Flacon trop rempli → Risque de faux positif

5- Etiquetage au moment du prélèvement (cf document intranet « Check list prélèvement »)

Zone de collage sur les anciens flacons

OK


Ne pas coller dans cette zone

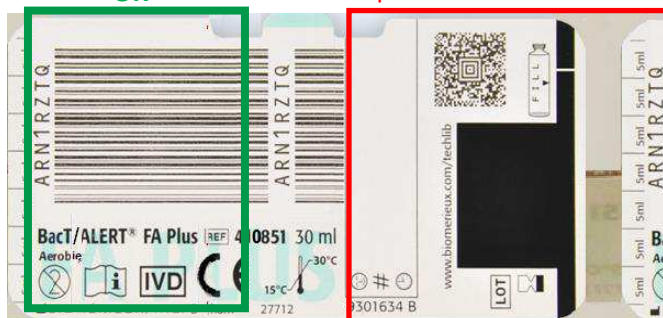

Zone de collage sur les nouveaux flacons

OK

Ne pas coller dans cette zone

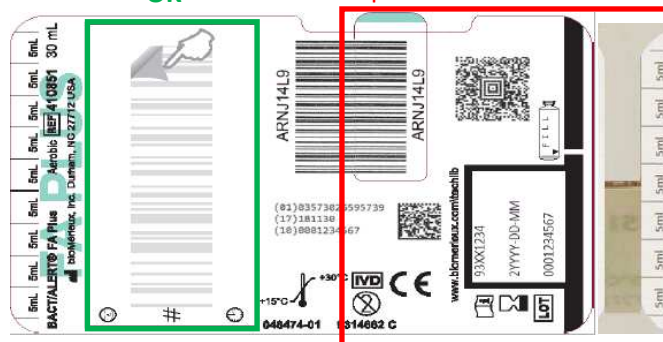

1- Coller sur la feuille de demande:

- les étiquettes patients, UH, prescripteur et préleveur (moustiquette intranet)
- les onglets code-barres des flacons sur l'emplacement dédié

2- Coller sur le flacon l'étiquette patient

- A la verticale sur l'étiquette du flacon comme indiqué par **l'encadré vert**
- La zone à ne pas masquer est visible sur par **l'encadré rouge** et comprend le QR code