	Etiquette <b>SERVICE</b>	Etiquette <b>MEDECIN</b>	Etiquette <b>PRELEVEUR</b>
	ou	ou	ou
Etiquette	Code Hôpital-UH :	Nom-Prénom :	Nom-Prénom :
PATIENT			
DMU BioGeM – Hôpital Saint-Louis		Laboratoire de Pharmacologie Biologique	
Service Génomique des Tumeurs et Pharmacologie Pr Samia MOURAH		H. Sauvageon 01 42 49 42 87 L. Goldwirt 01 42 49 43 25	

Phénotypage DPD					
Phénotypage de la Dihydropyrimidine Deshydrogénase avant traitement par 5-FU					
Organe-cible :	Taille	Poids			
☐ Côlon ☐ Foie ☐ Pancréas	m	kg			
1) <b>Prélèvement</b> : Tube héparinate de lithium <b>VERT SANS GEL</b> séparateur					
Date: / / et Heure: h h					
<ol> <li>Mettre 2 étiquettes Patient avec le tube dans le sac gris. Coller l'étiquette Urgent DPD sur le sac.</li> </ol>					
Adresser <u>immédiatement</u> le sac par le pneumatique à l'ACDL avant 16h50. (en cas de panne, acheminement <u>urgent</u> par voie pédestre)					
ACCUEIL COMMUN DES LABORATOIRES – HÔPITAL BEAUJON					
Prétraitement urgent ! A réaliser dès réception !					
Centrifuger le tube à +4°C à l'aide de la centrifugeuse réfrigérée. Décanter le plasma à la suite.					
Reporter l'heure de mise au congélateur sur l'étiquette de l'aliquote.					
Le lendemain, transférer l'aliquote sous carboglace au <b>laboratoire de Pharmacologie Biologique de</b>					
l'hôpital Saint-Louis. 					
Heure de dépôt de l'aliquote au congé	elateur :				

CADRE RESERVE AU LABORATOIRE : Revue de contrat					
Type et nombre de prélèvements reçus :  Identification d'une non-conformité critique :  Echantillon(s) non identifié(s)  Discordance Echt/Prescription  Echantillon(s) manquant(s)  Contenant non adapté  Echantillon(s) accidenté(s)	Si Pré-traitement Centrifugation Décantation Pas de pré-traitement Conservation avant envoi TA 2 à 8°C -20°C	Date et heure d'arrivée à l'accueil du site expéditeur  Visa :  Date et heure d'arrivée à l'accueil du site destinataire  Visa :  JB62 07/12/2017			
ACCUEIL CENTRALISE DE BIOLOGIE – HÔPITAL SAINT-LOUIS					
Date et heure de réception à l'AC	B Saint-Louis :				
Date: / / et Heure: h h					
Nombre et type de prélèvements	reçus :				
Conditions de réception du/des prélèvements : Congelés OUI NON En cas de réception non conforme (prélèvement arrivé sur site Saint-Louis non congelé) effectuer une non-conformité et avertir le laboratoire de Pharmacologie Biologique.					
LES PRELEMENTS ARRIVES CONGELES DOIVENT ÊTRE MAINTENUS CONGELES					
Enregistrement SLS : code Hôpital UH 005515					